

The logo for VENOSAFE, featuring the brand name in a stylized white font on a green rectangular background.

BLUTENTNAHMESYSTEME



SICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE

The logo for TERUMO, consisting of a green circular icon with a stylized 'T' and the word 'TERUMO' in a bold, green, sans-serif font. Below the logo is the tagline 'We keep life flowing' in a smaller, black font.

Eine Geschichte der Forschung und Entwicklung

TERUMO® ist die Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft, die weltweit wegen ihrer Innovativkraft und der hervorragende Qualität ihrer Systeme geschätzt wird. Die große Auswahl an Qualitätserzeugnissen für Angiographie, Kardiologie, Patientenüberwachung, Transfusion sowie die kardiovaskulären Produkte und die klinischen Testsystemen erfüllen die höchsten Standards in der medizinische Welt. Sie tragen in über 150 Ländern beständig und zuverlässig zur Gesundheit bei.



In den frühen Sechzigern des 20. Jahrhunderts führte TERUMO® das VENOJECT®-Glassystem für Vakkumtechnik ein - ein bedeutender Schritt vorwärts in der Blutentnahmetechnologie. In den Neunzigern Jahren bedeuteten die VENOJECT® II Polyethylenterephalat (PET) Plastikröhrchen einen weiteren Meilenstein in der Labordiagnostik im Hinblick auf Leistung, Sicherheit und Komfort für Patienten und Anwender. Das TERUMO® PET-Material ist ein Qualitätsprodukt hinsichtlich seiner patentierten Gasbarriere (XB317), der Unzerbrechlichkeit und seiner hervorragenden Biokompatibilität sowie seiner Umweltfreundlichkeit. Das Blut verbleibt in einer Umgebung, die fast so natürlich wie der menschliche Organismus selbst ist, so dass die analytischen Ergebnisse mindestens genauso gut und bisweilen sogar besser sind als die, die aus Glasröhrchen erzielt werden.

Um der zunehmenden Anforderung nach Standardisierung in den Laboratorien und dem begründeten Verlangen nach effektiven Sicherheitslösungen gerecht zu werden, entwickelte TERUMO® das VENOSAFETM-System, die 3. Generation seiner hervorragenden klinischen Testsysteme. Es verbindet die anerkannte PET-Technologie von VENOJECT® II mit ausgezeichneten Sicherheitsmerkmalen zugunsten des Benutzers und des Patienten. VENOSAFETM-Röhrchen sind TERUMO®s Beitrag zur bedeutenden Reduzierung des Risikos von Kontaminationen für Pflegekräfte, Labormitarbeiter und Ärzten. Gleichzeitig werden die Durchsatzzeiten in den klinischen Labs reduziert und die analytischen Ergebnisse verbessert.



VENOJECT®-Mehrfachentnahmekanülen: Referenzprodukt für höheren Komfort und bessere Qualität

VENOJECT®-Mehrfachentnahmekanülen, die zusammen mit VENOSAFETM und VENOJECT®-Entnahmeröhrchen benutzt werden, sichern während der Venenpunktion größtmöglichen Komfort für Patienten. Dank ihres sehr scharfen Doppelfacetenschliffs sind Freisetzung von Thromboplastin und mögliche Gewebeschäden während des Einstichs sehr gering. Die Beschichtung ermöglicht der Mehrfachentnahmekanüle eine sanfte, ungehinderte Bewegung im Gefäß zwischen Einstich und Aufhebung der Punktion.

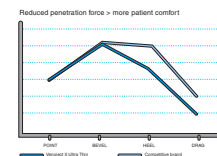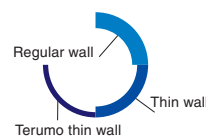

Ein besonderes Design und eine optimierte Zusammensetzung der Ventilkappe bedeuten eine Reduzierung des Kontaminationsrisikos, indem sie sich beim Röhrchenwechsel und nach Ende der Entnahme sofort wieder über das distale Ende der Mehrfachentnahmekanüle schiebt. VENOJECT®-Ventile sind weltweit für ihre ausgezeichneten Wiederverschlusseigenschaften bekannt.

VENOJECT®-Mehrfachentnahmekanülen mit Terumo-Dünnwandstruktur erlauben höhere Fließgeschwindigkeiten des Blutes aufgrund ihres größeren Innendurchmessers und vermindern das Hämolyserisiko während der Blutentnahme. So werden zuverlässige Testergebnisse gesichert.

VENOSAFE™: Sicherheit ergänzt Qualität

Verbesserte Sicherheitsstandards und erhöhte Automatisierung in Laboratorien setzen immer strengere Anforderungen an Blutentnahmegefäße. Die Kombination von VENOSAFE™ Röhrcchen, VENOSAFE™-Kanülenhalter und VENOJECT® Mehrfachentnahmekanülen sichert einen sehr hohen Komfort für den Patienten und stellt eine der schnellsten und sichersten Methoden zur Blutentnahme dar. VENOSAFE™ Röhrcchen ermöglichen in Zusammenhang mit der anerkannten TERUMO® PET Technologie klinische Analysenergebnisse ohne Beeinflussung durch das Entnahmematerial - über die gesamte Haltbarkeit.



VENOSAFE™ QUICK FIT-Kanülenhalter

Das ergonomische, benutzerfreundliche QUICK FIT-System erhöht die Sicherheit und den Komfort für das medizinische Fachpersonal und den Patienten. Das QUICK FIT-Bajonett-Prinzip zur Verbindung von Kanüle und Halter sichert eine sehr starke Kanüleneinfixierung sowie eine sehr schnelle Entsorgung und verkürzt somit die Zeit für die Blutentnahme. Es erlaubt vielfache Nutzung eines Halters - eine zusätzliche Reduzierung von Kosten und Abfallvolumen.

QUICK Safe-TE Halter: Sicherheit ohne Kompromisse

Als Antwort auf die immer deutlicher zunehmende Akzeptanz der Notwendigkeit von Sicherheitsprodukten gerade in der Blutentnahme hat TERUMO® den QUICK SAFE-TE Sicherheitshalter entwickelt - eine exzellente Ergänzung der Blutentnahmeaccessoires. Der QUICK SAFE-TE Halter ist ein komfortables und leicht zu handhabendes, ergonomisches Produkt, dass zur Erleichterung der Blutentnahme und sicheren Entsorgung entwickelt wurde.

VENOSAFE™-Röhrcchen: Unsere Antwort auf die zunehmende Notwendigkeit für sichere, effiziente und sehr zuverlässige Blutentnahmesysteme

VENOSAFE™ besteht aus glasklaren PET-Röhrcchen mit einer patentierten Gasbarriere und einem Sicherheitsverschluss, der sich aus einem Elastomerstopfen und einer Sicherheitsmanschette zusammensetzt. Der Verschluss dient als Schutzschirm während des Öffnens und Wiederverschließens.

Der Elastomerstopfen versiegelt das Röhrcchen vollständig gasdicht und garantiert eine einfache Blutentnahme. Füllstandsmarkierungen verbessern die Handhabung während der Blutentnahme und die Laborleistungsfähigkeit, indem stets das richtige Verhältnis zwischen Blut und Additiv gesichert wird.





VENOSAFE™ -BLUTENTNAHMESYSTEME

Vorteile für die Blutentnahme




Glasklares, unzerbrechliches PET mit der patentierten Gasbarriere und geringem Gewicht

- Hohe Sicherheit
- Immer genaue, standardisierte Füllung der Röhren → kostensparend, erhöhter Komfort für den Patienten
- Sehr ergonomisch
- Garantiert zuverlässige und visuelle Vorprüfung der Probe



Eindeutige Farbdifferenzierung der Verschlusskappen

- Sichere Identifizierung der Röhren für die angeforderten Analysen
→ erleichtert die Arbeit des medizinisches Fachpersonals

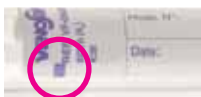

Füllstandsmarkierungen für alle Entnahmevermengen auf beiden Seiten des Etiketts

- Arbeitserleichterung
- Hohe Genauigkeit der Analytik
→ Kosteneinsparung



Eindeutige Farbkennzeichnung der Etiketten von Röhren mit reduziertem Vakuum

- Keine doppelte Entnahme
→ Arbeitserleichterung

Sehr sanfter ungehinderter Eintritt des distalen Endes der Kanüle in den weichen Elastomerstopfen der VENOSAFE™-Röhren

- Leichte, schnelle und sehr ergonomische Blutentnahme
- Verbessertes Komfort für den Patienten



Bessere Griffbarkeit am VENOSAFE™-Röhrenboden für einen sicheren Halt während der Venenpunktion

- Arbeitserleichterung

VENOSAFE™-LABORSYSTEME

Vorteile für das klinische Labor

Sicherheitsverschluss

- Verbessert die Sicherheit während der Handhabung
- Einfaches Öffnen (manuell oder automatisch)
- Zuverlässiges Wiederverschließen
- Farbcodierung (ISO 6710: 1995) zur sicheren Zuordnung und Analyse



Vollflächiger Elastomerstopfen

- Verlängert die Lebensdauer von Analysengeräte
- Eine besondere Beschichtung reduziert deutlich die Anhaftung von Zellen
- Reduziert Kosten



Kristallklares, unzerbrechliches PET mit der patentierten Gasbarriere und sehr geringem Gewicht

- Zuverlässige optische Kontrolle der Probe
- Sichert die hohe Genauigkeit der Analyseergebnisse
- Geringere Transport- und Entsorgungskosten

Füllstandsmarkierungen auf beiden Seiten des Etiketts für alle Zugvolumen

- Hohe Genauigkeit der Analytik
- Verbessert die Laborleistungsfähigkeit und reduziert Kosten



Klare Farbkennzeichnung der Etiketten auf Rörchen mit reduziertem Vakuum

- Verbessert die Laborleistungsfähigkeit



Gerrinnungsaktivator (sichtbare Wandbeschichtung)

- Für eine schnelle und vollständige Blutgerinnung und somit höhere Serumausbeute

Besondere Verpackung für Gerinnungsrörchen

- Erhält das richtige Verhältnis von Blut und Additiv während der angegebenen Haltbarkeit und sichert eine sehr zuverlässige Gerinnungsanalytik
- Analytische Sicherheit für den Patienten



Hervorragendes OLEFIN-Trenngel

- Garantiert hohe Trenneigenschaften über mehrere Tage
- Minimale Beeinflussung der Probenqualität durch Zellinhaltsstoffe
- Keine Abspaltung von Öltropfen → verlängert die Lebenszeit von Analysegeräten

Die Kombination der VENOSAFE™-Rörchen mit dem Sicherheitsverschluss erfüllt die Anforderungen der Laborautomatisation

- Sichert die geringe Durchlaufzeit von Proben
- Sorgt für Kostenoptimierung



KLINISCHE CHEMIE (SERUM)


CE

	ARTIKEL-CODE	NOMINALVOLUMEN (ml)	ZUGVOLUMEN (ml)	ADDITIV	VERPACKUNGSEINHEIT
	VF-052SP	5	2	Gerinnungsaktivator	12x100
	VF-053SP	5	3	Gerinnungsaktivator	12x100
	VF-054SP	5	4	Gerinnungsaktivator	12x100
	VF-076SP	7	5,5	Gerinnungsaktivator	12x100
	VF-109SP	10	9	Gerinnungsaktivator	12x100


KLINISCHE CHEMIE (SERUM mit TRENNGEL)

	ARTIKEL-CODE	NOMINALVOLUMEN (ml)	ZUGVOLUMEN (ml)	ADDITIV	VERPACKUNGSEINHEIT
	VF-054SAS	5	3,5	Gel+Gerinnungsaktivator	12x100
	VF-075SAS	7	4,5	Gel+Gerinnungsaktivator	12x100
	VF-106SAS	10	6	Gel+Gerinnungsaktivator	12x100
	VF-108SAS	10	8	Gel+Gerinnungsaktivator	12x100
	VF-054SAS02	5	3,5	Gel+Gerinnungsaktivator	12x100
	VF-075SAS02	7	4,5	Gel+Gerinnungsaktivator	12x100
	VF-106SAS02	10	6	Gel+Gerinnungsaktivator	12x100
	VF-108SAS02	10	8	Gel+Gerinnungsaktivator	12x100


KLINISCHE CHEMIE (PLASMA)

	ARTIKEL-CODE	NOMINALVOLUMEN (ml)	ZUGVOLUMEN (ml)	ADDITIV	VERPACKUNGSEINHEIT
	VF-052SHL	5	2	Li-Heparin	12x100
	VF-053SHL	5	3	Li-Heparin	12x100
	VF-054SHL	5	4	Li-Heparin	12x100
	VF-076SHL	7	5,5	Li-Heparin	12x100
	VF-109SHL	10	9	Li-Heparin	12x100
	VF-052SH	5	2	Na-Heparin	12x100
	VF-053SH	5	3	Na-Heparin	12x100
	VF-054SH	5	4	Na-Heparin	12x100
	VF-076SH	7	5,5	Na-Heparin	12x100
	VF-109SH	10	9	Na-Heparin	12x100

KLINISCHE CHEMIE (PLASMA mit TRENNGEL)

	ARTIKEL-CODE	NOMINALVOLUMEN (ml)	ZUGVOLUMEN (ml)	ADDITIV	VERPACKUNGSEINHEIT
	VF-054SAHL	5	3,5	Gel+Li-Heparin	12x100
	VF-075SAHL	7	4,5	Gel+Li-Heparin	12x100
	VF-106SAHL	10	6	Gel+Li-Heparin	12x100
	VF-108SAHL	10	8	Gel+Li-Heparin	12x100

KLINISCHE CHEMIE (NOTFALL)

	ARTIKEL-CODE	NOMINALVOLUMEN (ml)	ZUGVOLUMEN (ml)	ADDITIV	VERPACKUNGSEINHEIT
	VF-054ST	5	4	Thrombin	12x100
	VF-109ST	10	9	Thrombin	12x100

GLYKÄMIE

	ARTIKEL-CODE	NOMINALVOLUMEN (ml)	ZUGVOLUMEN (ml)	ADDITIV	VERPACKUNGSEINHEIT
	VF-052SFX	5	2	Na-Fluorid+K2-Oxalat	12x100
	VF-053SFX	5	3	Na-Fluorid+K2-Oxalat	12x100
	VF-054SFX	5	4	Na-Fluorid+K2-Oxalat	12x100
	VF-052SFC	5	2	FC-Mischung	12x100
	VF-053SFC	5	3	FC-Mischung	12x100
	VF-052SFH	5	2	Na-Fluorid+Na-Heparin	12x100
	VF-053SFH	5	3	Na-Fluorid+Na-Heparin	12x100
	VF-054SFH	5	4	Na-Fluorid+Na-Heparin	12x100

HÄMATOLOGIE

CE

	ARTIKEL-CODE	NOMINALVOLUMEN (ml)	ZUGVOLUMEN (ml)	ADDITIV	VERPACKUNGSEINHEIT
	VF-052SDK	5	2	K2-EDTA	12x100
	VF-053SDK	5	3	K2-EDTA	12x100
	VF-054SDK	5	4	K2-EDTA	12x100
	VF-076SDK	7	5,5	K2-EDTA	12x100
	VF-109SDK	10	9	K2-EDTA	12x100
	VF-052STK	5	2	K3-EDTA	12x100
	VF-053STK	5	3	K3-EDTA	12x100
	VF-054STK	5	4	K3-EDTA	12x100

GERINNUNG

	ARTIKEL-CODE	NOMINALVOLUMEN (ml)	ZUGVOLUMEN (ml)	ADDITIV	VERPACKUNGSEINHEIT*
	VF-052SBCS	5	1,8	Na3-Citrat 3,8% gepuffert	15x10
	VF-052SBCS07	5	1,8	Na3-Citrat 3,2% gepuffert	15x10
	VF-053SBCS	5	2,7	Na3-Citrat 3,8% gepuffert	15x10
	VF-053SBCS07	5	2,7	Na3-Citrat 3,2% gepuffert	15x10
	VF-054SBCS	5	3,6	Na3-Citrat 3,8% gepuffert	15x10
	VF-054SBCS07	5	3,6	Na3-Citrat 3,2% gepuffert	15x10
	VF-053SCTAD	5	2,7	CTAD-Lösung	15x10
	VF-054SCTAD	5	3,6	CTAD-Lösung	15x10

VIRUSLAST

	ARTIKEL-CODE	NOMINALVOLUMEN (ml)	ZUGVOLUMEN (ml)	ADDITIV	VERPACKUNGSEINHEIT
	VF-054SADK	5	3,5	Gel+K2-EDTA	12x100
	VF-075SADK	7	4,5	Gel+K2-EDTA	12x100
	VF-108SADK	10	8	Gel+K2-EDTA	12x100

BLUTSENKUNG

	ARTIKEL-CODE	NOMINALVOLUMEN (ml)	ZUGVOLUMEN (ml)	ADDITIV	VERPACKUNGSEINHEIT	
	VF-053SJ	5	2,4	Na3-Citrat 3,8 % gepuffert	15x10*	
	VF-053SJ07	5	2,4	Na3-Citrat 3,1 % gepuffert	15x10*	
	Geschlossenes Blutsenkungs System:					
	VT-963SES02	5,5	2,4	Na3-Citrat 3,8 % gepuffert	12x100	
	Blutsenkungsständer: RA-963EST					
	VT-965SES02	5,5	4,4	Na3-Citrat 3,8 % gepuffert	12x100	
	Blutsenkungsständer: RA-010EST					

URINANALYTIK

	ARTIKEL-CODE	NOMINALVOLUMEN (ml)	ZUGVOLUMEN (ml)	ADDITIV	VERPACKUNGSEINHEIT
	VF-109SURI	10	9	ohne	12x100

* Demnächst verfügbar: 1 Stück-Verpackung

Haltbarkeit: Gel-Röhrchen 24 Monate
 Thrombin-Röhrchen 12 Monate
 alle anderen Röhrchen 18 Monate
 VT-Artikel (Glasröhrchen) 18 Monate

Weitere Ausführungen erfahren Sie unter www.terumo-europe.com/labo_home.html oder durch den für Sie zuständigen Außendienst in Ihrer Region. Änderungen an diesem Prospekt bleiben vorbehalten.
 AUTOMATISCHE BLUTSENKUNGS-LESEGERÄTE UND DECAPPER AUF ANFRAGE.

QUICK FIT SYSTEM
HALTER

€

ARTIKEL-CODE	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
XX-VF10HGSQ	VENOSAFE-HALTER	40x25



XX-VFHQSAF	VENOSAFE SICHERHEITSHALTER	10x100
------------	----------------------------	--------



XX-VFHBQSU	VENOSAFE EINMALHALTER	1x1500
------------	-----------------------	--------



XX-ORGHQ	BacT/ALERT®-HALTER	10x10
----------	--------------------	-------



XX-ORGI	BacT/ALERT®-ADAPTER	10x10
---------	---------------------	-------



XX-VF10HGSQ4	URIN-ENTNAHMEKANÜLEN-HALTER	40x25
--------------	-----------------------------	-------



Biologische Proben und Blutentnahmekanülen im Besonderen sollten stets als potentiell ansteckend angesehen und deshalb mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Alle relevanten Hinweise für die sachgemäße Handhabung sollten unter Berücksichtigung eigener Arbeitsschutzmaßnahmen beachtet werden. Benutzte Mehrfachentnahmekanülen bitte niemals mit der Original-Protector wiederverschließen sondern in ein geeignetes Sammelgefäß, wie zum Beispiel TERUSAFE entsorgen.

VENOJECT-MEHRFACHENTNAHMEKANÜLEN

€ 0197

ARTIKEL-CODE	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
MN-2038MQ	0,9 X 40 mm	20X100
MN-2025MQ	0,9 x 25 mm	20x100
MN-2138MQ	0,8 x 40 mm	20x100



MN-2125MQ	0,8 x 25 mm	20x100
MN-2238MQ	0,7 x 40 mm	20x100
MN-2225MQ	0,7 x 25 mm	20x100

URINENTNAHME

ARTIKEL-CODE	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
UN-2038Q	0,9 x 40 mm (stumpf)	20x100


VENOJECT LUER-ADAPTER

€ 0197

ARTIKEL-CODE	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
XX-MN2000Q		20X100


FLÜGELKANÜLENSETS MIT SURSHIELD-SCHUTZÜBERWURF

€ 0123

ARTIKEL-CODE	SCHLAUCH-LÄNGE	VERPACKUNGSEINHEIT
MN*SVS21BQ30	300 mm	16x50
MN*SVS23BQ30	300 mm	16x50
MN*SVS21BQ18	180 mm	16x50
MN*SVS23BQ18	180 mm	16x50
MN*SVS21BQ09	90 mm	16x50
MN*SVS23BQ09	90 mm	16x50


FLÜGELKANÜLENSETS

€ 0197

ARTIKEL-CODE	SCHLAUCH-LÄNGE	VERPACKUNGSEINHEIT
MM-SV21Q	300 mm	16x50
MM-SV23Q	300 mm	16x50



SCHRAUBSYSTEM

HALTER

CE

ARTIKEL-CODE	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
XX-VF010HGS	VENOSAFE-HALTER	40x25



XX-VFHGLA	VENOSAFE-HALTER MIT LUER-ADAPTER	1x500
-----------	----------------------------------	-------



VENOJECT-MEHRFACHENTNAHMEKANÜLEN

CE 0197

ARTIKEL-CODE	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
MN-2038M	0,9 x 40 mm	20x100
MN-2025M	0,9 x 25 mm	20x100
MN-2138M	0,8 x 40 mm	20x100



MN-2125M	0,8 x 25 mm	20x100
MN-2238M	0,7 x 40 mm	20x100
MN-2225M	0,7 x 25 mm	20x100

VENOJECT LUER-ADAPTER

CE 0197

ARTIKEL-CODE	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
XX-MN2000		20x100



FLÜGELKANÜLENSETS MIT SURSHIELD-SCHUTZÜBERWURF

CE 0123

ARTIKEL-CODE	SCHLAUCH-LÄNGE	VERPACKUNGSEINHEIT
MN*SVS21BW30	300 mm	16x50
MN*SVS23BW30	300 mm	16x50
MN*SVS21BW18	180 mm	16x50
MN*SVS23BW18	180 mm	16x50
MN*SVS21BW09	90 mm	16x50
MN*SVS23BW09	90 mm	16x50



FLÜGELKANÜLENSETS

CE 0197

ARTIKEL-CODE	SCHLAUCH-LÄNGE	VERPACKUNGSEINHEIT
MN-SV21	300 mm	16x50
MN-SV23	300 mm	16x50



DIFF-SAFE®

CE

ARTIKEL-CODE	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
XX+VF00S	DIFF-SAFE	10x1000



ENTSORGUNGSBOXEN

ARTIKEL-CODE	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
XX+Q2500	TERUSAFE-ENTSORGUNGSBOX 2,5 L, RECHTECKIG	45
XX+Q2510	TERUSAFE-ENTSORGUNGSBOX 2,5 L, RUND*	45
XX+Q2010	TERUSAFE-ENTSORGUNGSBOX 2,0 L, RUND*	60
XX+Q1510	TERUSAFE-ENTSORGUNGSBOX 1,5 L, RUND*	80
XX+Q0001	TERUSAFE KLEBE-ADAPTER	50



TÜVIGS genehmigt

* kann mit dem Klebeadapter auf jedem Untergrund fixiert werden

STAUBINDEN

CE

ARTIKEL-CODE	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
XX+TC	STAUBINDE FÜR ERWACHSENE	100
XX+TCB1	STAUBINDE FÜR KINDER	100
XX+TCB2	STAUBINDE FÜR BABYS	100



Sicherheit ohne Kompromisse



Das **VENOSAFE™ Blutentnahmesystem** von TERUMO® basiert auf einem glas-klaarem PET Röhrchen mit einer patentierten Gas-Barriere und einem Sicherheitsverschluss bestehend aus einer manschettenförmigen Kappe und einem innenliegenden Verschlussstopfen.

Dieses schon seit vielen Jahren etablierte Blutentnahmesystem reduziert das Kontaminierungsrisiko und verbessert den Komfort für die Patienten und gewährleistet schnelle und effiziente Entnahme- und Testabläufe.



... ist so einfach!


Die TERUMO® QUICK FIT Angebotspalette bietet eine flexible Lösung für das sachgerechte Sicherheitsmanagement in jeder Situation.

Die Elemente der QUICK-FIT-Palette wie z.B. der QUICK-FIT-Halter, der QUICK Safe-TE Sicherheitshalter, die QUICK-FIT-Mehrfachentnahmekanülen, die Sicherheitsblutentnahmesets sowie die TERUSAFE-Entsorgungsboxen passen perfekt zueinander.



We keep

life flowing

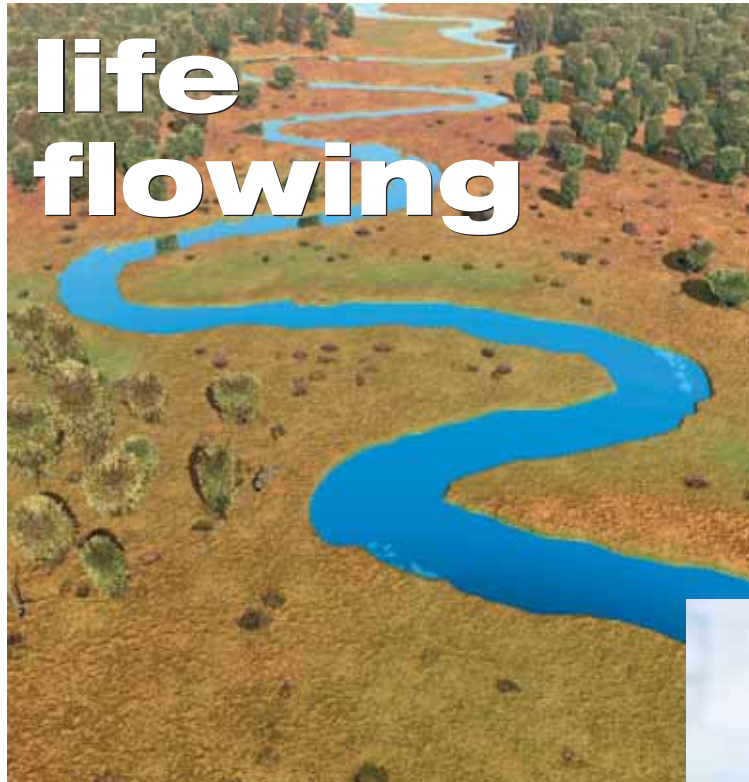

Every day,
as healthcare
professionals,
you are working
to ensure life and
to contribute
to the well-being
of your patients.
Every day,
Terumo Europe
provides you
with the clinical
systems, means and
solutions
to keep life flowing.



TERUMO®

TERUMO® und VENOJECT® sind eingetragene Warenzeichen von TERUMO CORPORATION
SURSHIELD™ ist ein Warenzeichen von TERUMO CORPORATION
VENOSAFE™ ist ein Warenzeichen von TERUMO EUROPE N.V.
BactIALERT® ist ein eingetragenes Warenzeichen von bioMérieux
DIFF-SAFE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ALPHA SCIENTIFIC



**Diabetes
Systems**



**Angiographic
and interventional
Systems**



**Cardiovascular
Systems**



**Laboratory
Systems**



**Hospital
Systems**



**Transfusion
Systems**

TERUMO CORPORATION
44-1, 2-chome
Hatagaya
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072
JAPAN
Tel. +81/3 3374.8111
Fax +81/3 3374.8196

TERUMO EUROPE N.V.
Researchpark Zone 2 Haasrode
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.38.12.11
Fax +32/16.40.02.49

**TERUMO EUROPE N.V.
BENELUX SALES DIVISION**
Researchpark Zone 2 Haasrode
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.39.25.80
Fax +32/16.39.25.99
THE NETHERLANDS
Tel. 0800/022.03.96
Fax 0800/022.04.14

**LABORATOIRES TERUMO
FRANCE S.A.**
1, Parc Ariane
Bâtiment Uranus
Rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex
FRANCE
Tel. +33/1 30.96.13.00
Fax +33/1 30.43.60.85

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH
Hauptstrasse 87
65760 Eschborn
GERMANY
Tel. +49/61.96.80.230
Fax +49/61.96.80.23.200

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH
Zweigniederlassung Wettingen
Bahnhofstrasse 88
CH-5430 Wettingen
SWITZERLAND
Tel. +41/56.419.10.10
Fax +41/56.419.10.11

TERUMO EUROPE ESPAÑA SL
Avda. Juan Carlos I, N° 13 - 7ª Planta
Edificio Torre La Garena
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
SPAIN
Tel. general: +34/902.10.12.98
cust. serv.: +34/902.20.31.40
Fax general: +34/902.10.13.58
cust. serv.: +34/902.10.17.57

TERUMO ITALIA SRL
Via Simone Martini 143/145
I-00142 Roma
ITALY
Tel. +39/06.519.61.420
Fax +39/06.503.04.07

TERUMO SWEDEN AB
Nya Varvet, Byggnad 90
Sven Källfelts Gata 18
SE-426 71 Västra Frölunda
SWEDEN
Tel. +46/31.748.58.80
Fax +46/31.748.58.90

**TERUMO DENMARK
Filial af TERUMO SWEDEN AB**
Tel. +45/7020.93.80
Fax +45/7020.94.80

TERUMO UK Ltd.
Tamesis
The Causeway
Egham
Surrey
TW20 9AW
UNITED KINGDOM
Tel. +44/1784.476.200
Fax +44/1784.476.201

TERUMO EUROPE N.V.
Moscow Representative office
4, Ivana Franko St
121108 Moscow
RUSSIA
Tel. +7/495.234.3303
Fax. +7/495.234.3303

®: Registered Trademark
Published by Terumo Europe N.V.
www.terumo.com
www.terumo-europe.com

Den Adressen sind Änderungen
vorbehalten, bitte konsultieren Sie
unser Internetseite.