



SURSHIELD

SICHERHEIT MIT EINEM “KLICK”

FLÜGELKANÜLENSSET MIT SURSHIELD-SCHUTZÜBERWURF




Dank seiner sehr innovativen Gestaltung wird durch den SURSHIELD-Schutzüberwurf unmittelbar nach Entfernung der Kanüle aus der Vene das freie Nadelende sicher abgeschirmt.

Das TERUMO-Flügelkanülen-set mit dem SURSHIELD-Schutzüberwurf ist eine weitere wichtige Produktentwicklung zur Reduzierung der Risiken von Nadelstichverletzungen und Kontaminationen für das medizinische Fachpersonal und für die Patienten.

We keep life flowing
TERUMO®








EIGENSCHAFTEN UND NUTZEN

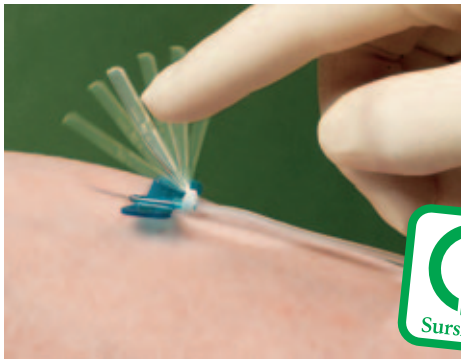

Sicherheit mit einem "Klick"...

Dank seines einmaligen Designs reduziert der SURSHIELD-Schutzüberwurf das Risiko von Nadelstichverletzungen für das medizinische Fachpersonal und den Patienten bedeutend. Ein sehr funktionelles und innovatives Design erlaubt es, den SURSHIELD-Schutzüberwurf leicht in einer einzigen durchgehenden Handbewegung über die Kanüle zu legen, nachdem die Punktion beendet ist. Ein leichter Druck auf den Protektor und die Flügel gleichzeitig genügt. Ein deutliches Klicken und das Inspektionsfenster lassen sofort erkennen, dass sich der Protektor irreversibel um die Kanüle gelegt hat. Danach kann das Blutnahmeset in einer TERUSAFE-Box entsorgt werden. Dazu muss man einfach nur den QUICK FIT- Mechanismus bedienen. Während wir die Sicherheit für das medizinische Fachpersonal und den Patienten bedeutend verbessert haben, bleibt das Verfahren der Blutentnahme gleich. Die griffigen, farbkodierten Flügel der TERUMO-Flügelkanülensets bieten zusätzlichen Komfort für eine sichere Venenpunktion. Alle Anwender können sich auf die bewährte Qualität der TERUMO- Flügelkanülensets verlassen, sie stellt eine zügige Blutentnahme und ausgezeichnete Laboreergebnisse sicher; da sich der Schlauch in jeder Anwendungssituation weder einrollt noch knickt. Für den Patienten bedeutet die anerkannte Kanülentechnologie von TERUMO höchsten Komfort durch eine nahezu atraumatische und sanfte Punktion.

HANDHABUNGSHINWEISE

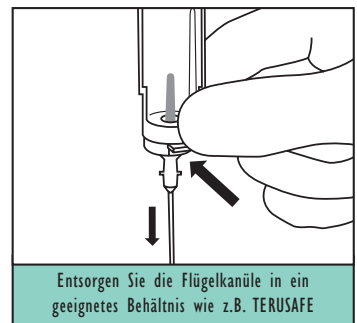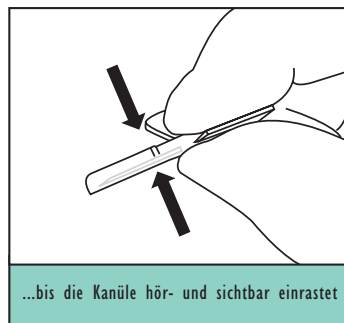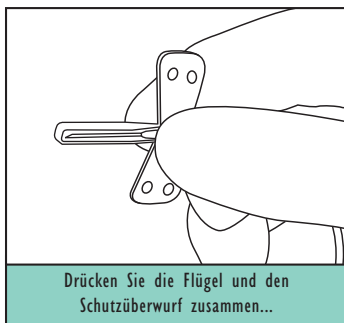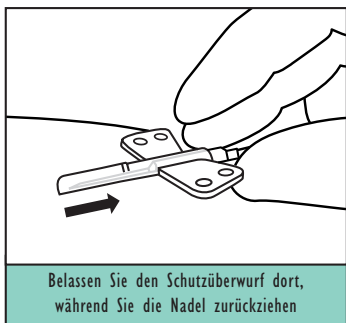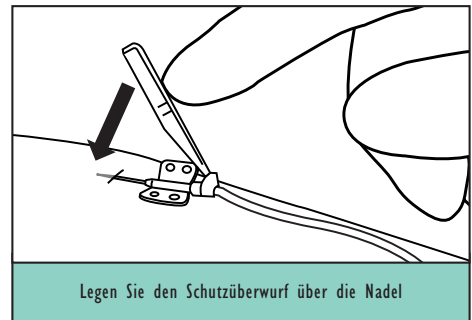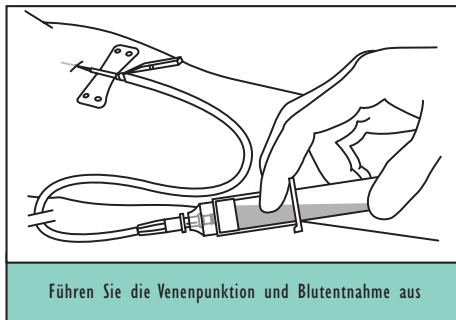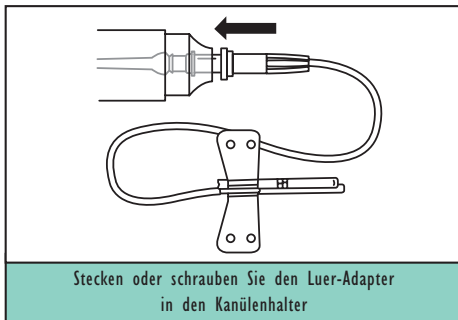

SURSHIELD PRODUKTPALETTE

CE 0123

Biologische Proben und Blutentnahmekanülen im Besonderen sollten stets als potentiell infektiös angesehen und deshalb mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Alle relevanten Hinweise für die sachgemäße Handhabung sollten unter Berücksichtigung eigener Arbeitsschutzmaßnahmen beachtet werden. Benutzte Mehrfachentnahmekanülen bitte niemals mit der Original-Schutzkappe wiederverschließen, sondern in ein geeignetes Sammelgefäß wie zum Beispiel TERUSAFE, entsorgen.

ARTIKEL	TYP	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	HALTBARKEIT	
	QUICK FIT-SYSTEM	MN*SVS21BQ30	21G, 30 cm	36 Monate	
		MN*SVS21BQ18	21G, 18 cm	36 Monate	
		MN*SVS21BQ09	21G, 9 cm	36 Monate	
			MN*SVS23BQ30	23G, 30 cm	36 Monate
			MN*SVS23BQ18	23G, 18 cm	36 Monate
			MN*SVS23BQ09	23G, 9 cm	36 Monate
	SCHRAUBSYSTEM		MN*SVS21BW30	21G, 30 cm	36 Monate
			MN*SVS21BW18	21G, 18 cm	36 Monate
			MN*SVS21BW09	21G, 9 cm	36 Monate
		MN*SVS23BW30	23G, 30 cm	36 Monate	
		MN*SVS23BW18	23G, 18 cm	36 Monate	
		MN*SVS23BW09	23G, 9 cm	36 Monate	

Für weitere Informationen sprechen Sie bitte unsere Außerdienstmitarbeiter an.

TERUMO® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TERUMO CORPORATION
SURSHIELD™ ist ein Warenzeichen der TERUMO CORPORATION

TERUMO EUROPE N.V. • Researchpark Zone 2 Haasrode • Interleuvenlaan 40 • B-3001 Leuven • BELGIUM
Tel. +32/16.38.12.11 • Fax +32/16.40.02.49 • www.terumo-europe.com • www.terumo.com

