





QUICK FIT

SICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE

## Sicherheit war noch nie so einfach

Das einmalige Bajonett-Verschlussprinzip aller QUICK FIT-Produkte erleichtert das Einstecken der Mehrfachentnahmekanüle signifikant. Ein kurzer Druck und ein hörbares Klicken garantieren die festsitzende Verbindung der Blut- und Urinentnahmekanülen mit den Kanülenhaltern. Nach Gebrauch wird die Kanüle ohne Kontakt mit der Hand einfach durch Druck auf die seitlichen Knöpfe entsorgt. Wir empfehlen den Gebrauch des QUICK FIT SYSTEMS in Kombination mit den TERUMO /TERUSAFE- Entsorgungsboxen. TERUSAFE-Entsorgungsboxen sind mit

einer besonderen Öffnung ausgerüstet, welche perfekt zu den Abmessungen der QUICK FIT-Halter passt. Um die Nadel unmittelbar zu entsorgen, muss nach dem Herausziehen aus der Vene der QUICK FIT-Halter nur in diese Öffnung gedrückt werden - die Nadel fällt automatisch in die TERUSAFE-Entsorgungsbox. Nadelstichverletzungen werden deutlich reduziert, wenn man mit der QUICK FIT – TERUSAFE-Kombination arbeitet.

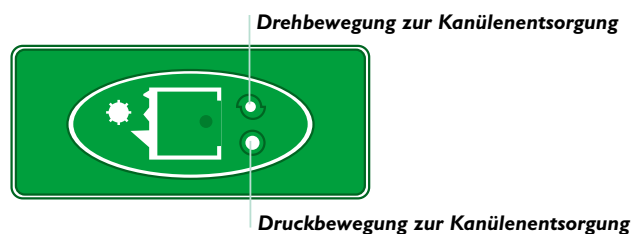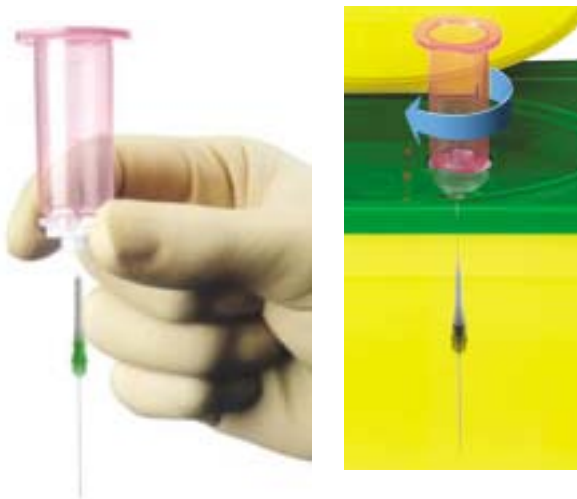

Entnahmen mit QUICK FIT-Haltern erfordern weniger Zeit als mit konventionellen Schraubsystemen, während das Blutentnahmeverfahren gleich bleibt. Da der QUICK FIT-Halter bis zu 200 mal wiederverwendet werden kann, reduziert sich die Abfallmenge mit einer positiven Wirkung für unsere Umwelt. Das QUICK FIT-System ist auf den Komfort der Anwender und der Patienten ausgerichtet und ergänzt die hervorragenden Eigenschaften von VENOSAFE™ und VENOJECT® -Röhrchen und VENOJECT®-Mehrfachentnahmekanülen.

### Erhöhte Sicherheit und Leistungsfähigkeit

Da QUICK FIT sehr leicht zu benutzen ist, den Blutentnahmeprozess beschleunigt und deutlich das Risiko von Nadelstichverletzungen reduziert, kann es als das rentabelste Blutentnahmesystem auf dem Markt angesehen werden.

### Keine Umstellung im Verfahren

Blutentnahme mit dem QUICK FIT-System funktioniert genauso wie bei jedem konventionellen Halter.

### Verbesserter Komfort für den Patienten und das medizinische Fachpersonal

Mit dem QUICK FIT / BacT/ALERT®-Halter und -Adapter können Blutkulturflaschen und venöse Blutentnahmen mit nur einer Venenpunktion durchgeführt werden.

### Weniger Abfall und geringere Entsorgungskosten

QUICK FIT Halter können bis zu 200 mal wieder verwendet werden, wodurch das Abfallvolumen und die Entsorgungskosten deutlich reduziert werden.

**Um den zunehmenden Anforderungen für sichere und schnelle Blut- und Urinentnahmen gerecht zu werden, hat TERUMO sein QUICK FIT-Produktspektrum entscheidend erweitert.**

### Wiederverwendbarer QUICK FIT-Halter

#### Einhändige Entsorgung

Die Entsorgung der Mehrfachentnahmekanülen erfolgt durch leichten Druck auf die beiden seitlichen Knöpfe des QUICK FIT-Halters oder durch Drücken des Halters in die TERUSAFE QUICK FIT-Entsorgungsöffnung. Auf diese Weise ist der Körperkontakt mit der Nadel ausgeschlossen und ein hoher Schutz vor Nadelstichverletzungen gegeben.



#### Mehrfachentnahmekanülen mit einzigartigem Bajonettverschluss

Der einstufige Bajonettverschluss garantiert eine sichere Fixierung der Mehrfachentnahmekanüle und wirkt äußerst verschleißmindernd.

#### TERUMO-Kanülen mit ihrer Ultra-Dünnwand-Struktur

stellen das Qualitätsniveau der medizinischen Welt dar. Die dünnere Nadelwand erlaubt einen ungehinderten und schnellen Blutfluss in die Entnahmeröhrchen. Durch den sehr scharfen Doppelfacettenschliff der Kanülenspitze erfolgen die Punktionen nahezu atraumatisch.



### TERUSAFE-Entsorgungsboxen

TERUSAFE-Entsorgungsboxen in verschiedenen Größen sind für die sichere Entsorgung von VENOJECT®-Mehrfachentnahmekanülen verfügbar.

TÜV/GS geprüft

### QUICK FIT BacT/ALERT®-Kanülenhalter

Der QUICK FIT BacT/ALERT®-Halter wurde insbesondere für die Verwendung mit bioMérieux BacT/ALERT® Blutkulturflaschen entworfen. Nach der Entnahme der Blutkulturprobe wird die Flasche aus dem Halter genommen und der QUICK FIT- BacT/ALERT®-Adapter in den Halter eingeführt, sodass unmittelbar darauf die Entnahme weiterer Proben durch VENOSAFE™ und VENOJECT®-Entnahmeröhrchen erfolgen kann.



### Flügelkanülenset mit dem SURSHIELD-Schutzüberwurf und dem QUICK FIT-Bajonettprinzip

Dieses Produkt stellt die ultimative Sicherheitslösung dar. Ein sehr innovatives Design erlaubt es, den SURSHIELD-Schutzüberwurf in einer einzigen durchgehenden Handbewegung über die Kanüle zu legen, nachdem die Punktion beendet ist. Danach kann das Blutentnahmeset in einer TERUSAFE-Box entsorgt werden. Dazu muss einfach nur der QUICK FIT- Mechanismus bedient werden.



### QUICK FIT-Halter für VENOSAFE™-Urinentnahmeröhrchen

Das Urin-Entnahmesystem beinhaltet alle Vorteile des QUICK FIT-Systems, zur deutlichen Unterscheidung für die Verwendung sind die Kanülenhalter gelb eingefärbt, passend zum gelben Bajonettverschluss der stumpfen Urinentnahmekanülen. So wird eine schnelle und sichere Entnahme von Urinproben aus allen Vorlagegefäßen ermöglicht, gleichzeitig wirkt sich die Metallkanüle positiv auf die Probenqualität aus, da keine Proteine adsorbiert werden, wie es bei Kunststoffschlauchsystemen der Fall sein kann.



**QUICK FIT SYSTEM**

**KANÜLENHALTER** €

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
XX-VF10HGSQ	VENOSAFE-HALTER	40X25



XX-VP10HGSQE	VENOJECT-HALTER	40X25
--------------	-----------------	-------



XX-ORGHQ	BACTALERT-HALTER	10X10
----------	------------------	-------



XX-ORGI	BACTALERT-ADAPTER	10X10
---------	-------------------	-------



XX-VF10HGSQ4	URINENTNAHME-KANÜLEN-HALTER	40X25
--------------	-----------------------------	-------



**VENOJECT-MEHRFACHENTNAHMEKANÜLEN** € 0197

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
MN-2038MQ	0.9 x 40 mm	20x100
MN-2025MQ	0.9 x 25 mm	20x100
MN-2138MQ	0.8 x 40 mm	20x100



MN-2125MQ	0.8 x 25 mm	20x100
MN-2238MQ	0.7 x 40 mm	20x100
MN-2225MQ	0.7 x 25 mm	20x100

**URINENTNAHME**

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
UN-2038Q	0.9 x 40 mm (stumpf)	20x100



**VENOJECT LUER-ADAPTER** € 0197

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
XX-MN2000Q		20x100



**FLÜGELKANÜLENSSET MIT SURSHIELD-SCHUTZÜBERWURF** € 0197

BESTELLNUMMER	SCHLAUHLÄNGE	VERPACKUNGSEINHEIT
MN-SV21Q02	300 mm	16x50
MN-SV23Q02	300 mm	16x50
MN-SV21Q04	180 mm	16x50
MN-SV23Q04	180 mm	16x50
MN-SV21Q05	100 mm	16x50
MN-SV23Q05	100 mm	16x50



**FLÜGELKANÜLENSSET** € 0197

BESTELLNUMMER	SCHLAUHLÄNGE	VERPACKUNGSEINHEIT
MN-SV21Q	300 mm	16x50
MN-SV23Q	300 mm	16x50



Biologische Proben und Blutentnahmekanülen im Besonderen sollten stets als potentiell infektiös angesehen und deshalb mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Alle relevanten Hinweise für die sachgemäße Handhabung sollten unter Berücksichtigung eigener Arbeitsschutzmaßnahmen beachtet werden. Benutzte Mehrfachentnahmekanülen bitte niemals mit der Original-Schutzkappe wiederverschließen, sondern in ein geeignetes Sammelgefäß, wie zum Beispiel TERUSAFE, entsorgen.

**SICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE:**  
TERUMO arbeitet fortwährend und erfolgreich an der Entwicklung sicherer, zuverlässiger und akkurater Medizinprodukte für vielfältige Anwendungszwecke.

**ZENTRALE JAPAN**

**TERUMO CORPORATION**  
44-1, 2-chome  
Hatagaya  
Shibuya-ku  
Tokyo 151  
JAPAN  
Tel. +81/3.3374.8111  
Fax +81/3.3374.8196

**ZENTRALE EUROPA, Hersteller**

**TERUMO EUROPE N.V.**  
Researchpark Zone 2 Haasrode  
Interleuvenlaan 40  
B-3001 Leuven  
BELGIUM  
Tel. +32/16.38.12.11  
Fax +32/16.40.02.49

**TERUMO EUROPE N.V. BENELUX SALES DIVISION**

Researchpark Zone 2 Haasrode  
Interleuvenlaan 40  
B-3001 Leuven  
BELGIUM  
Tel. +32/16.38.14.02  
Fax +32/16.38.15.55

THE NETHERLANDS  
Tel. 0800/023.19.38  
Fax 0800/022.34.89

**LABORATOIRES TERUMO FRANCE S.A.**

I, Parc Ariane  
Bâtiment Uranus  
Rue Hélène Boucher  
78284 Guyancourt Cedex  
FRANCE  
Tel. +33/1.30.96.13.00  
Fax +33/1.30.43.60.85

**TERUMO (DEUTSCHLAND) GmbH**

Lyoner Straße 11 a  
60528 Frankfurt am Main  
GERMANY  
Tel. +49/69.66.44.20  
Fax +49/69.66.66.826

**TERUMO EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA**

Avenida de Burgos 16-D  
Edificio EUROMOR  
Madrid 28036  
ESPAÑA  
Tel. +34/91.383.90.69  
+34/91.383.91.61  
Fax +34/91.767.04.60

**TERUMO EUROPE ROME BRANCH**

Via Simone Martini 143/145  
I-00142 Roma  
ITALIA  
Tel. +39/06.519.61.420  
Fax +39/06.503.04.07

**TERUMO EUROPE N.V.**

Belgien filial Sverige  
Nya Varvet  
Byggnad 90  
SE-426 71 Västra Frölunda  
SWEDEN  
Tel. +46/31.748.58.80  
Fax +46/31.748.58.90

**TERUMO U.K. (Branch of TERUMO EUROPE N.V.)**

3 Unity Grove  
Off School Lane  
Knowsley Industrial Park South  
Knowsley  
Merseyside  
L34 9GT  
UNITED KINGDOM  
Tel. +44/151.482.4800  
Fax +44/151.482.4811


[www.terumo-europe.com](http://www.terumo-europe.com)  
[www.terumo.com](http://www.terumo.com)

Veröffentlicht durch TERUMO EUROPE N.V.

Für weitere Informationen sprechen Sie bitte unsere Vertriebsbeauftragten an.

TERUMO® und VENOJECT® sind eingetragene Warenzeichen der TERUMO CORPORATION  
SURSHIELD™ ist ein Warenzeichen der TERUMO CORPORATION  
VENOSAFE™ ist ein Warenzeichen von TERUMO EUROPE N.V.  
Bact/ALERT® ist ein eingetragenes Warenzeichen von bioMérieux

Every day,  
as healthcare  
professionals,  
you are working  
to ensure life  
and to contribute  
to the well-being  
of your patients.  
Every day,  
**TERUMO Europe**  
provides you  
with all the systems  
and solutions  
for the safe daily  
transfer of vital fluids  
to keep life flowing.

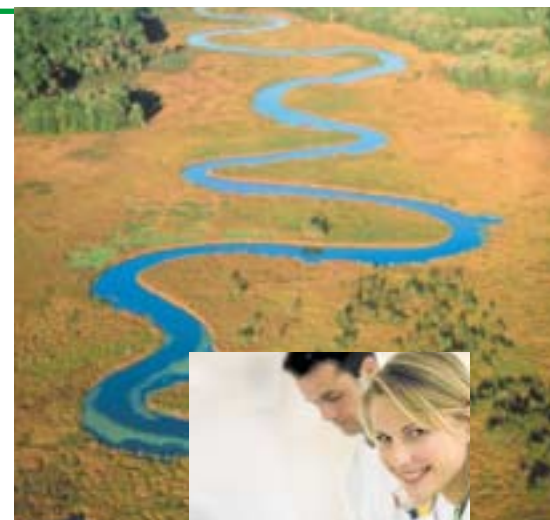

We keep life flowing

**TERUMO®**