





QUICK FIT

SEGURIDAD SIN COMPROMISO

Un clic de seguridad

El exclusivo acoplamiento tipo bayoneta de todos los instrumentos QUICK FIT facilita considerablemente la inserción de las agujas. Una simple presión y un clic audible garantizan la conexión hermética del sistema para la toma de muestras de sangre/orina. Después de su uso, puede retirar la aguja sin contacto físico alguno, ya que solamente hace falta pulsar los botones laterales del soporte. Le aconsejamos usar el SISTEMA QUICK FIT en combinación con los contenedores TERUSAFE de

TERUMO. Los contenedores TERUSAFE tienen una apertura especial para desechos con las mismas dimensiones que las del soporte QUICK FIT. Para desechar la aguja inmediatamente después de su retirada de la vena, solamente tiene que introducir el soporte QUICK FIT en esta abertura y la aguja se suelta automáticamente en el contenedor TERUSAFE. Cuando usa esta combinación QUICK FIT – TERUSAFE, se reducen considerablemente las lesiones por pinchazo.

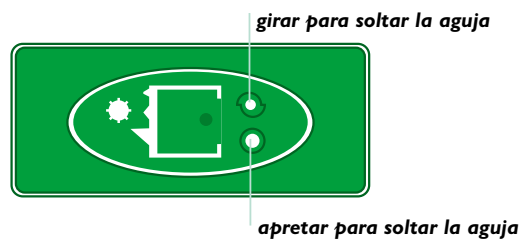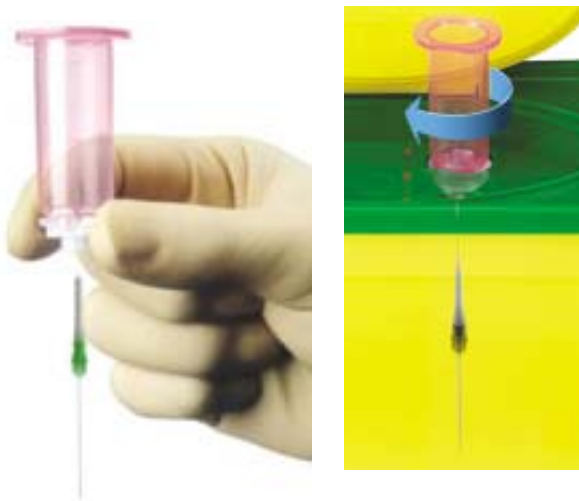

Es más rápido hacer el muestreo mediante los soportes QUICK FIT que mediante los sistemas convencionales de rosca, mientras que el procedimiento de toma de muestras de sangre es exactamente igual. Debido a que puede volver a utilizar el soporte QUICK FIT hasta 200 veces, se reduce la cantidad total de desechos, lo cual tiene un efecto positivo para el medio ambiente. El sistema QUICK FIT ha sido diseñado prestando atención a la comodidad de usuarios y pacientes y viene a completar las excelentes calidades de los tubos y las agujas VENOSAFE™ y VENOJECT®.

Mayor seguridad y eficacia

Puesto que QUICK FIT es muy fácil de usar, acelera el procedimiento de toma de muestras de sangre y reduce sustancialmente el riesgo de lesiones por pinchazos, puede considerarse como el sistema de toma de muestras de sangre más económico del mercado.

No hace falta aprender un procedimiento nuevo


El muestreo mediante el sistema QUICK FIT funciona exactamente igual que con cualquier otro soporte convencional.

Mayor comodidad para el paciente y el usuario

Con el soporte y el accesorio de inserción BacT/ALERT® de QUICK FIT, es posible llenar frascos para cultivos sanguíneos y realizar tomas de sangre en una sola venopunción.

Menos desechos y reducción de los gastos de eliminación

Puede volver a usar los soportes QUICK FIT hasta 200 veces. Asimismo se reduce el volumen de los desechos y los gastos de su eliminación.



A fin de satisfacer mejor la demanda cada vez mayor de tomas de muestras seguras y rápidas de sangre y de orina, TERUMO ha ampliado considerablemente su gama de productos QUICK FIT.

**Soporte QUICK FIT reutilizable
Se desconecta con una sola mano**

Puede soltar la aguja apretando los dos botones laterales del soporte QUICK FIT o presionando el soporte en la apertura de desconexión del contenedor TERUSAFE QUICK FIT. De esta manera se excluye cualquier contacto físico con la aguja y se evitan las lesiones por pinchazo.



Aguja con acoplamiento exclusivo tipo bayoneta

El acoplamiento tipo bayoneta de un solo paso garantiza la conexión hermética de la aguja y protege del desgaste al soporte QUICK FIT.

Aguja TERUMO de pared ultra fina

Representa la mejor norma de calidad en el mundo médico. La pared interior más fina de la aguja permite un flujo de sangre más fácil y rápido en el tubo, mientras su punta aguda de doble biselado causa menos reacciones tisulares.



Contenedores TERUSAFE

Existen contenedores TERUSAFE de varios tamaños para desconectar y desechar las agujas VENOJECT® con seguridad.

Aprobado por el TÜV/GS



Soporte QUICK FIT BacT/ALERT®

El soporte BacT/ALERT® QUICK FIT ha sido diseñado especialmente para su uso con los frascos para cultivos sanguíneos BacT/ALERT® de bioMérieux. Después de la toma de sangre para el cultivo sanguíneo, se retira el frasco del soporte, se introduce la pieza de inserción en el soporte BacT/ALERT® QUICK FIT para poder continuar tomando muestras de sangre venosas con los tubos VENOSAFE™ y VENOJECT®.



Kit para la toma de muestras de sangre con aletas, con protector Surshield y acoplamiento tipo bayoneta QUICK FIT

Es la solución de seguridad suprema; con un diseño altamente innovador que permite la colocación del protector "Surshield" en un solo movimiento y con una sola mano, inmediatamente después de retirar la aguja de la vena del paciente. A continuación, puede desecharse el kit para la toma de muestras de sangre en un contenedor TERUSAFE activando al mecanismo de desconexión QUICK FIT.



Soporte QUICK FIT para tubos de orina VENOSAFE™

Reúne todas las ventajas del sistema QUICK FIT y se diferencia claramente de los soportes para la toma de muestras de sangre QUICK FIT gracias a la indicación de color amarillo. Las agujas romas para orina QUICK FIT permiten un muestreo de orina rápido y no absorben proteínas como lo hacen frecuentemente los tubos convencionales de plástico.



SISTEMA QUICK FIT

SOPORTES €

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
XX-VF10HGSQ	SOPORTE VENOSAFE	40X25



XX-VP10HGSQE	SOPORTE VENOJECT	40X25
--------------	------------------	-------



XX-ORGHQ	SOPORTE BACTALERT	10X10
----------	-------------------	-------



XX-ORGI	PIEZA DE INSERCIÓN BACTALERT	10X10
---------	------------------------------	-------



XX-VF10HGSQ4	SOPORTE TUBO DE URINA	40X25
--------------	-----------------------	-------



VENOJECT AGUJAS PARA MUESTRAS MÚLTIPLES € 0197

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
MN-2038MQ	0.9 x 40 mm	20x100
MN-2025MQ	0.9 x 25 mm	20x100
MN-2138MQ	0.8 x 40 mm	20x100



MN-2125MQ	0.8 x 25 mm	20x100
MN-2238MQ	0.7 x 40 mm	20x100
MN-2225MQ	0.7 x 25 mm	20x100

MUESTREADOR DE URINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
UN-2038Q	0.9 x 40 mm (obtusos)	20x100



ADAPTADOR LUER VENOJECT € 0197

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
XX-MN2000Q		20x100



EQUIPO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE CON ALETAS CON EL PROTECTOR SURSHIELD € 0197

CÓDIGO	TUBO	EMBALAJE
MN-SV21Q02	300 mm	16x50
MN-SV23Q02	300 mm	16x50
MN-SV21Q04	180 mm	16x50
MN-SV23Q04	180 mm	16x50
MN-SV21Q05	100 mm	16x50
MN-SV23Q05	100 mm	16x50



EQUIPO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE CON ALETAS € 0197

CÓDIGO	TUBO	EMBALAJE
MN-SV21Q	300 mm	16x50
MN-SV23Q	300 mm	16x50



Debe considerar las muestras biológicas, y las agujas de toma de muestra de sangre en particular, como potencialmente contagiosas y, desde luego, debe manipularlas con cuidado. Debe respetar todas las instrucciones de uso relevantes, y cumplir meticulosamente la política y los procedimientos de su unidad. No vuelva a poner el protector de agujas usadas, sino tirelas en contenedores aprobados para peligros biológicos.

SEGURIDAD SIN COMPROMISO:
TERUMO aspira continuamente a desarrollar equipos médicos más seguros, más fiables y más precisos.

OFICINA PRINCIPAL JAPÓN

TERUMO CORPORATION
44-1, 2-chome
Hatagaya
Shibuya-ku
Tokyo 151
JAPAN
Tel. +81/3.3374.8111
Fax +81/3.3374.8196

OFICINA PRINCIPAL EUROPA, Fabricante

TERUMO EUROPE N.V.
Researchpark Zone 2 Haasrode
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.38.12.11
Fax +32/16.40.02.49

TERUMO EUROPE N.V. BENELUX SALES DIVISION

Researchpark Zone 2 Haasrode
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.38.14.02
Fax +32/16.38.15.55

THE NETHERLANDS

Tel. 0800/023.19.38
Fax 0800/022.34.89

LABORATOIRES TERUMO

FRANCE S.A.
1, Parc Ariane
Bâtiment Uranus
Rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex
FRANCE
Tel. +33/1.30.96.13.00
Fax +33/1.30.43.60.85

TERUMO (DEUTSCHLAND) GmbH

Lyoner Straße 11 a
60528 Frankfurt am Main
GERMANY
Tel. +49/69.66.44.20
Fax +49/69.66.66.826

TERUMO EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA

Avenida de Burgos 16-D
Edificio EUROMOR
Madrid 28036
ESPAÑA
Tel. +34/91.383.90.69
+34/91.383.91.61
Fax +34/91.767.04.60

TERUMO EUROPE ROME BRANCH

Via Simone Martini 143/145
I-00142 Roma
ITALIA
Tel. +39/06.519.61.420
Fax +39/06.503.04.07

TERUMO EUROPE N.V.

Belgien filial Sverige
Nya Varvet
Byggnad 90
SE-426 71 Västra Frölunda
SWEDEN
Tel. +46/31.748.58.80
Fax +46/31.748.58.90

TERUMO U.K. (Branch of TERUMO EUROPE N.V.)

3 Unity Grove
Off School Lane
Knowsley Industrial Park South
Knowsley
Merseyside
L34 9GT
UNITED KINGDOM
Tel. +44/151.482.4800
Fax +44/151.482.4811

www.terumo-europe.com


www.terumo.com

Publicado por TERUMO EUROPE S.A.

Para otras referencias, le rogamos consulte a nuestros representantes locales.

TERUMO® y VENOJECT® son marcas registradas de TERUMO CORPORATION
SURSHIELD™ es una marca de TERUMO CORPORATION
VENOSAFE™ es una marca de TERUMO EUROPE S.A.
BacTALERT® es una marca registrada de bioMérieux

Cada día, los profesionales sanitarios se esfuerzan para garantizar la vida y para contribuir al bienestar de sus pacientes. Cada día, **TERUMO Europe** les proporciona todos los sistemas y todas las soluciones para una transferencia diaria y segura de los fluidos vitales para mantener el flujo de la vida.

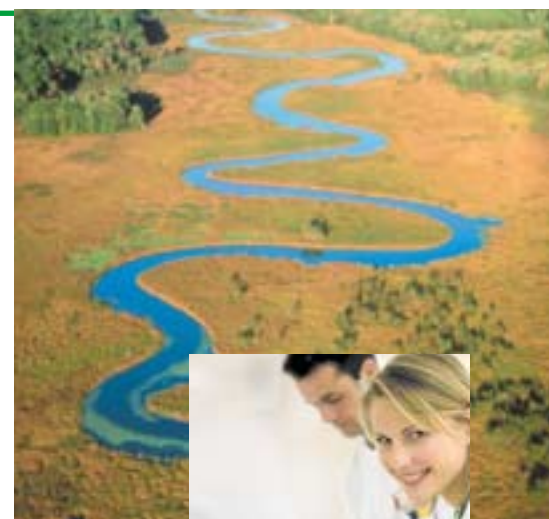

We keep life flowing

TERUMO®